

あっぱくんライトは日本版 救急蘇生ガイドライン 2020 及び科学的データに基づいて制作しています。
(このハートは、約30kg の圧力で音が鳴ります。これにより、適正圧力をリアルに表現しています。)

監修

国立大学法人 京都大学環境安全保健機構附属健康科学センター：石見 拓

公益財団法人 日本心臓財団

特定非営利活動法人 大阪ライフサポート協会

**PUSH
プロジェクト**

胸骨圧迫だけの心肺蘇生と、AEDからなる簡易型の
心肺蘇生の普及を目指すプロジェクト


PUSH コース

胸骨圧迫と、AEDを45分程度で学ぶ効果的かつ
効率的なトレーニング


あっぱくんライトは、胸骨圧迫（心臓マッサージ）とAEDの 使用方法を短時間で学ぶことができる教材です。

使い方

- 付属のトレーニングシートの上に「心臓部」を置いて上から圧迫してください。
上手に圧迫できると音が鳴ります。
- 「擬似 AED パッド」をトレーニングシートの指定場所に置いてください。
正しい AED パッドの貼り付け位置を把握できます。

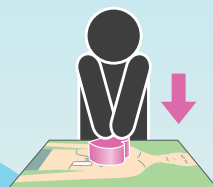

構成内容

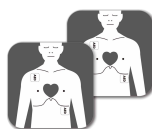

擬似 AED パッド
2 枚（紙製シート 6 cm×6 cm）




収納袋
1 枚（不織布）



トレーニングシート
1 枚（ユボ紙シート 65cm×45cm）



心臓部
1 個（心臓型樹脂）

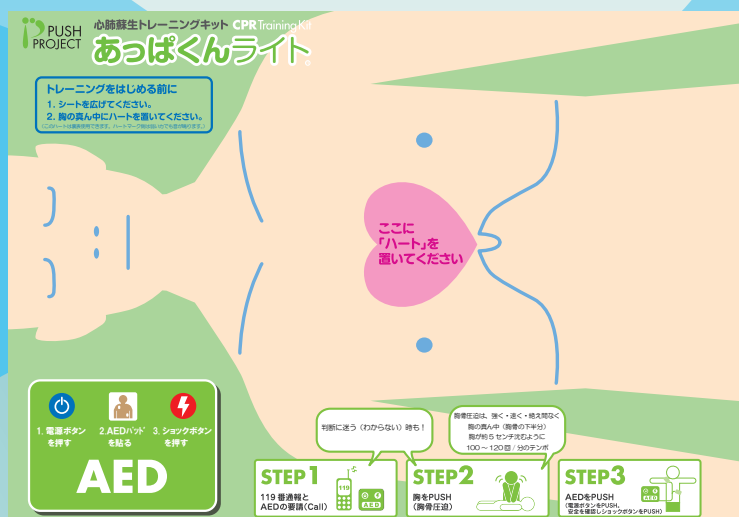

ご注文書

ご注文受付 FAX番号

06-6121-6049

ご発注年月日

年 月 日

商 品 名	価 格（税別）	数 量	合計金額（税別）
あっぱくんライト（20個入・送料込）	41,500 円		円

！別途消費税が必要となります。

お届け先

お名前			
ご住所	〒□□□-□□□□		
ご担当者名			
電話番号	()	—	
FAX 番号	()	—	

ご注文方法

必要事項をご記入いただき、FAXを送信願います。FAX 送信後、合計金額（税込）を下記口座へお振込みください。
ご入金確認後、お届け先住所へ商品を発送します。

□お振込先

りそな銀行 尼崎支店
当座 0405038 カ) アレクソン

※19 個以下のご注文の場合は、通信販売の『Amazon』で
ご購入願います。

※振込手数料は、お客様にてご負担願います。
※銀行振込明細書をもって、領収書の発行に代えるものとします。
※ご不明な点・ご要望がありましたら、お電話もしくは下記、
備考欄にご記入ください。

お問い合わせ先



株式会社 アレクソン

〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町 1-8-6 大永ビル 4 階
TEL：06-6121-6526 FAX:06-6121-6049

備考欄