

あっぱくんライトは日本版 救急蘇生ガイドライン2015及び科学的データに基づいて制作しています。
(このハートは、約30kgの圧力で音が鳴ります。これにより、適正圧力をリアルに表現しています。)


あっぱくんライトは、胸骨圧迫(心臓マッサージ)とAEDの 使用方を短時間で学ぶことができる教材です。

使い方

●付属のトレーニングシートの上に「心臓部」を置いて上から圧迫してください。
上手に圧迫できると音が鳴ります。

●「擬似 AED パッド」をトレーニングシートの指定場所に置いてください。
正しい AED パッドの貼り付け位置を把握できます。

構成内容

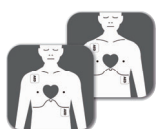

擬似 AED パッド
2 枚 (紙製シート 6 cm × 6 cm)




収納袋
1 枚 (不織布)



トレーニングシート
1 枚 (ユボ紙シート 65 cm × 45 cm)



心臓部
1 個 (心臓型樹脂)

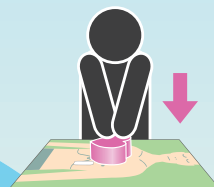

PUSH PROJECT 心肺蘇生トレーニングキット CPR Training Kit あっぱくんライト

トレーニングをはじめる前に
1. シートを広げてください。
2. 胸の真ん中にハートを置いてください。
(このハートは重量感があり、胸骨圧迫の感覚が伝います。)



AED



STEP 1
119 番通報と
AED の要請 (Call)



STEP 2
胸を PUSH
(胸骨圧迫)



STEP 3
AED を PUSH
(電流ショックを流す)

胸骨圧迫は、強く早く、疲れない
胸の真ん中 (胸骨の下半分)
胸が約 5 cm 沈むように
100 ~ 120 回 (約 2 分)

ご注文書

ご注文受付 F A X 番号

06-6121-6049

ご発注年月日

年 月 日

商 品 名	価 格 (送 料 込)	数 量	合 計 金 額 (税 別)
あっぱくんライト (20 個入り)	31,500 円		円

❗ 税別価格となります。

お届け先

お名前			
ご住所	〒□□□-□□□□		
ご担当者名			
電話番号	()	—	
FAX 番号	()	—	

ご注文方法

必要事項をご記入いただき、FAX を送信願います。FAX 送信後、合計金額 (税込) を下記口座へお振込みください。
ご入金確認後、お届け先住所へ商品を発送します。

お振込先

りそな銀行 尼崎支店
当座 0405038 カ) アレクソン

※19 個以下のご注文の場合は、通信販売の『Amazon』で
ご購入願います。

※振込手数料は、お客様にてご負担願います。
※銀行振込明細書をもって、領収書の発行に代えるものとします。
※ご不明な点・ご要望がありましたら、お電話もしくは下記、
備考欄にご記入ください。

お問い合わせ先



株式会社 アレクソン

〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町 1-8-6 大永ビル 4 階
TEL : 06-6121-6526 FAX: 06-6121-6049

備考欄